

Paradise Magazine

Phonak Paradise

Niets klinkt als het geluid van Paradise

Motion Sensor Hearing

Verbeterde algehele hoorbeleving

Roger

Hoor beter voorbij de 1.5 meter



Niets
klinkt als
het geluid
van
Paradise

Voor u ligt de special over Phonak Paradise, ons nieuwste hoortoestel. En niet zomaar een hoortoestel, het is een waar meesterwerk. Phonak Paradise is zo veelzijdig dat ze haar eigen glossy magazine verdient. Laat u verrassen door de unieke eigenschappen van dit multifunctionele hoortoestel dat meer mogelijkheden dan ooit tevoren biedt.

Wilt u meer details weten? Uw audicien vertelt u graag meer over Phonak Paradise.




A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marvin Hoogerwerf'.

Marvin Hoogerwerf
Sales Director Phonak



Inkijkje Phonak hoofdkantoor

De karakteristieke vorm van de centraal gelegen wenteltrap op het hoofdkantoor in Stäfa (Zwitserland) is een verwijzing naar het zgn. slakkenhuis (cochlea), het diepst in de schedel gelegen deel van het menselijk oor. Dagelijks werken er honderden engineers aan de nieuwste hoortoestellen.

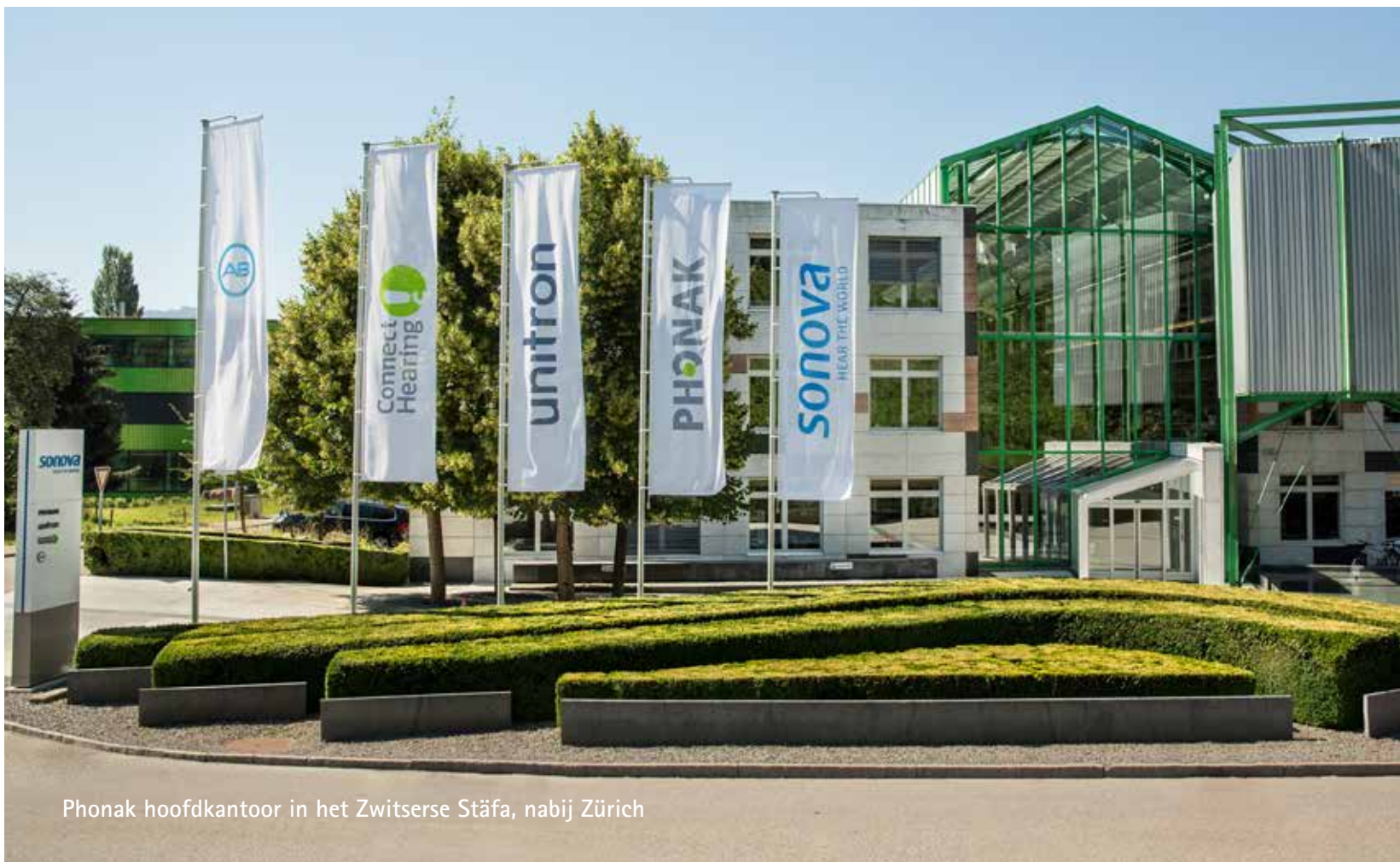

Phonak hoofdkantoor in het Zwitserse Stäfa, nabij Zürich



1 december 1994 – Phonak gaat naar de beurs;
De eigenaren Hans-Ueli Rihs, Andy Rihs en Beda
Diethelm op weg naar Swiss Stock Exchange.

Phonak Paradise is het resultaat van meer dan 70 jaar innovatie. Oorspronkelijk legde Phonak zich toe op hoortoestellen voor kinderen en zwaar slechthorenden. Deze doelgroepen vragen om de beste oplossingen, alleen het beste is goed genoeg. Hierin werd het uiterste gevraagd van onze kennis van audiologie en engineering. Deze pioniersgeest heeft Phonak gemaakt tot de meest innovatieve hoortoestelfabrikant wereldwijd. Tegenwoordig biedt ze oplossingen voor elk type gehoorverlies, voor jong en oud.

Scan de QR code met de camera van uw smartphone voor een kijkje in de "keuken" van Sonova.



Een verleden van excellentie



1947

Sinds de oprichting in 1947 is Phonak volledig toegewijd aan het veranderen van levens door de ontwikkeling, productie en distributie van state-of-the-art hooroplossingen.

70 years

Al meer dan 70 jaar helpen we mensen met onze hooroplossingen om zich op sociaal en emotioneel vlak optimaal te kunnen ontwikkelen. Hierbij verbeterden we keer op keer onze oplossingen door telkens de technologische vooruitgang te gebruiken ten gunste van de slechthorende.

Phonak, onderdeel van de Sonova Group, heeft haar hoofdkwartier in Zwitserland nabij Zurich. Het bedrijf ontwikkelt al meer dan zeventig jaar state-of-the-art hooroplossingen en draadloze communicatiemiddelen en distribueert deze over de hele wereld. Haar grote expertise in gehoortechnologie, meesterschap in akoestiek en een nauwe samenwerking met hoorzorgprofessionals, maken het mogelijk om het gehoor en het spraakverstaan van mensen met een gehoorbeperking significant te verbeteren, en daarmee ook de kwaliteit van hun leven.

Zwitsers erfgoed

We zijn een Zwitsers bedrijf dat streeft naar de allerbeste kwaliteit door ongekeerde precisie en betrouwbaarheid. Deze drang naar excellentie heeft een grote positieve impact op de levens van slechthorenden.



2006

Phonak is trotse supporter van de Hear The World Foundation, die zich sinds 2006 inzet voor gelijke kansen voor slechthorende kinderen over de hele wereld. Dit doet ze door lokale hoorzorg op te zetten samen met lokale partners en ondersteunt dit met kennisdeling en haar hooroplossingen.

Al meer dan 70 jaar uitzonderlijke kwaliteit.

Phonak Paradise, herontdek het wonder van geluid

Bij het creëren van haar nieuwste hooroplossing, heeft Phonak zich gericht tot de natuur voor inspiratie. De natuur is de bron van zoveel geluiden die ons kunnen kalmeren, ontspannen en troosten. Horen beschouwen we als iets dat we van nature doen. Het vermogen om te horen is zo'n wezenlijk onderdeel van ons bestaan en fundamenteel voor ons algehele welzijn. Er is geen betere manier om geluid te herontdekken dan met een door de natuur zelf geïnspireerd hoortoestel. Immers, **niets klinkt als het geluid van Paradise.**

Phonak Audéo Paradise is het resultaat van tientallen jaren technologische expertise, innovatie en onwrikbare passie.

Het belichaamt haar gedrevenheid en vastberadenheid om een hoortoestel te ontwikkelen dat, volgens Phonak, de beste oplossing voor dragers van hoortoestellen is.

Om dit te bereiken, heeft Phonak haar voorganger, het meest succesvolle hoortoestel ooit, **nog beter gemaakt: Phonak Paradise.** Paradise bestaat uit volledig nieuwe hardware en brengt hoorprestaties naar een hoger niveau met verschillende nieuwe functies. Het resultaat? **Een hoortoestel dat een ongeëvenaarde hoorervaring biedt:**

- Helder natuurlijk geluid
- Briljant spraakverstaan
- Gepersonaliseerde ruisonderdrukking
- Slimme apps
- Verbindt met alle smartphones, TV en meer
- Nieuwe Tap Control voor eenvoudige toegang tot Bluetooth® functionaliteiten



Het Bluetooth®-woordmerk en de logo's zijn geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door Sonova AG gebeurt onder licentie.

Is de serenade van een Venetiaanse gondelier
één van de wonderen van geluid?



De meest ontspannen hoorbeleving

Een nieuw hoortoestel, of beter gezegd, een nieuw platform. Dat betekent dat de Phonak Audéo Paradise een ongekend helder en natuurlijk geluid biedt en de beste verstaanbaarheid in alle luistersituaties. De connectiviteit met moderne elektronica is nog verder vergroot. De Phonak Audéo P, zoals hij officieel heet, kan met twee apparaten tegelijk verbonden zijn (bijv. mobiel en computer of vaste telefoon) en kan in totaal 8 apparaten koppelen (onthouden). Hierdoor wordt het gebruik van diverse apparaten zoveel makkelijker.



Verbeterde verstaanbaarheid

De Phonak Audéo Paradise heeft nieuwe techniek aan boord om zachte stemmen in rustige situaties beter verstaanbaar te maken. Vaak blijkt dat dit een probleem is in luistersituaties thuis waar de partner bijvoorbeeld wat zachter praat of verder weg zit. Phonak heeft met Paradise hier een antwoord op gevonden, zonder omgevingsgeluiden harder te maken.

Handsfree bellen



Telefoneren met de Phonak Paradise kan volledig handsfree, of u nou een Android of een iOS telefoon heeft. U hoort het gesprek goed verstaanbaar op beide oren en spreekt gewoon terug via de microfoons van het hoortoestel. U neemt het gesprek zelfs gewoon aan op het hoortoestel, de telefoon blijft gewoon in de jas. Beide handen vrij dus. Paradise is Made For All en werkt dus samen met alle mobieltjes. Nieuw is dat nu twee Bluetooth-apparaten tegelijk verbonden kunnen zijn zodat u zonder extra handeling snel wisselt tussen uw smartphone en tablet.



Muziek & TV luisteren op uw hoortoestellen

De Phonak Audéo Paradise ondersteunt rechtstreekse streaming van bv. muziek, luisterboeken en podcasts van uw Bluetooth geluidsspeler naar uw toestellen met een ongekende geluidskwaliteit. Het geluid van uw TV streamt u rechtstreeks naar uw toestellen met behulp van de TV Connector.



Makkelijke bediening van de Phonak Paradise: Tap control

Uiteraard beschikt de Audéo Paradise weer over de handige kantelschakelaar op het toestel. Stelt u zich nu eens voor dat u telefoongesprekken kunt aannemen, muziek kunt streamen of pauzeren en spraakbediening kunt activeren door slechts op uw oor te tikken. De bewegingssensor in de Paradise toestellen maakt dit mogelijk.



De myPhonak app verder uitgebreid

Krijg meer controle over het geluid in specifieke luisteromstandigheden. U regelt zelf in real time de instelling van de ruisonderdrukking waardoor u onmiddellijk het resultaat kunt horen. Ideaal in bijvoorbeeld een druk restaurant. Daarnaast blijft de bediening van zaken als volume, balans en klankkleur natuurlijk mogelijk in de app.



Op afstand bij te stellen, wel zo veilig

De gloednieuwe Paradise is in combinatie met de myPhonak app op afstand instelbaar. Uw audicien kan uw hoortoestellen bijstellen terwijl u rustig thuis op de bank zit. Alles om het u gemakkelijk te maken en wel zo veilig natuurlijk.

Audéo Paradise is verkrijgbaar in 4 modellen en 7 kleuren, zodat u hem kunt aanpassen aan uw wensen

Modellen met traditionele batterij



Audéo P-312

Audéo P-13T

Oplaadbare modellen



Audéo P-R

Audéo P-RT

Kleuren



P1 Sand Beige

H0 Beige

P4 Chestnut

P5 Champagne

P6 Silver Gray

P7 Graphite Gray

P8 Velvet Black



Op afstand bij te stellen, wel zo veilig

Remote Support stelt uw audicien in staat uw hoortoestellen op afstand (via het internet) bij te stellen in real time. Dit is handig in situaties wanneer u geen tijd heeft voor een bezoek aan de winkel of als u gewoon wilt dat uw audicien uw hoortoestellen optimaliseert in echte situaties en niet alleen in de winkel.

Audéo™ Paradise

Ontdek het wonder van geluid

Verfijnde Zwitserse engineering geeft Phonak Paradise een high tech uitstraling en hoge mate van betrouwbaarheid.







Ons DNA – Ons technologisch leiderschap wordt bepaald door de innovaties waarmee we ons onderscheiden van andere fabrikanten



Zorgeloos luisteren door volautomatische regeling

Paradise is het neusje van de zalm als het gaat over volautomatische werking. De eerste digitale hoortoestellen eind jaren 90 hadden al meerdere luisterprogramma's om per situatie de juiste instelling te bieden. Maar dit vraagt continue aandacht van de drager om zelf via het drukknopje een ander programma te kiezen. Al in 1999 wist Phonak dat dit verre van ideaal is en introduceerde destijds de eerste automaat in de Claro serie. Hierbij activeert het hoortoestel zelf het juiste programma op basis van een continue geluidsanalyse van de omgeving, zonder inmenging van de gebruiker. Nu, 20 jaar later, is de automaat in de Phonak Paradise zo geavanceerd dat het wel 200 luistersituaties kan onderscheiden en zelf het best passende programma activeert. De naadloze overgangen geven een zorgeloze luisterervaring.



Ongekende vrijheid door direct streaming

Phonak introduceerde in 2017 als eerste de 'Made for All' technologie, een vorm van ingebouwde bluetooth waarbij een directe koppeling tussen telefoon (of ander bluetooth apparaat) en hoortoestel mogelijk is. Een los streamerkastje om de hals is niet langer nodig en ook het merk telefoon maakt niet uit. Tot op de dag van vandaag is Phonak daar uniek in. Het demonstreert haar enorme expertise in draadloze technologie. Aanvullend biedt ze als enige handsfree telefoneren, doordat de hoortoestelmicrofoons de spraak van slechthorende opvangen en draadloos doorsturen naar de telefoon. Een unieke ervaring die een ongekende vrijheid geeft bij allerlei dagelijkse activiteiten.

De kracht van oplaadbare technologie

Phonak loopt voorop op het gebied van oplaadbaarheid binnen de hoorsector met de introductie van oplaadbare lithium-ion-accu's. De Paradise hoortoestellen zijn snel op te laden en gaan lang mee. De perfecte metgezel als u constant onderweg bent. Houd ze opgeladen en maak u nooit meer zorgen over batterijen.

Net zoals uw mobiele telefoon is Phonak Audéo Paradise altijd klaar voor gebruik. Ze gaan automatisch aan wanneer u ze uit de oplader haalt en gaan uit wanneer ze worden teruggeplaatst in de oplader. Geniet de hele dag van onbeperkt horen en streamen dankzij de kracht van oplaadbare technologie.

- Gebruiksgemak: geen gedoe meer met wegwerp batterijen
- Volledige dag horen, inclusief streamen
- Supersnel laden
- Accu is ontworpen om 6 jaar mee te gaan
- Optionele PowerPack als u op reis bent





Motion Sensor Hearing verbetert de luisterervaring op vele fronten

Nieuwe microfoonstrategie op basis van beweging heeft voordelen voor spraakverstaan, lokalisatie van geluiden en omgevingsbewustzijn.

Hoortoesteltechniek heeft de afgelopen 5 jaar aanzienlijke sprongen vooruit gemaakt. Moderne hoortoestellen hebben een zeer geavanceerde automatische werking die ervoor zorgt dat de instellingen zich automatisch aanpassen aan de geluidsomgeving die continue verandert. Deze veranderingen zijn volledig gebaseerd op metingen van de akoestische inputs (geluidsomgeving). Zo wordt bv. bij veel lawaai een lawaaionderdrukker actief. Dit is een bewezen methode, maar houdt geen rekening met beweging, zoals lopen. Speciaal hiervoor is de Motion Sensor eigenschap ontwikkeld die in de Phonak Paradise hoortoestellen te vinden is. Het helpt de automaat om betere beslissingen te maken voor de microfoonstrategie. Een bekend voorbeeld is als je naast iemand loopt. In een rumoerige omgeving zal het hoortoestel vanzelf naar voren kijken, waardoor je de spreker naast je minder goed hoort. Dat zou betekenen dat je de spreker tijdens het lopen continu moet aankijken, wat niet aan te raden is natuurlijk.

Ook krijg je minder mee van je omgeving. De Motion Sensor zorgt ervoor dat je hoortoestellen tijdens het lopen rondom gaan luisteren en zodra je stopt gaat het hoortoestel na enkele seconden weer naar voren kijken. Handig als je bijvoorbeeld iemand de weg wilt vragen in een rumoerige omgeving: de hoortoestellen richten zich dan vanzelf naar voren zodra je stilstaat. En zo zijn er diverse dagelijkse situaties waarbij Motion Sensor Hearing de algehele luisterervaring verbetert. Dat je beter kan bepalen waar geluiden vandaan komen (lokalisatie) komt door het simpele feit dat de hoortoestellen meer in de rondomgevoelige stand staan, wat een natuurlijker geluidsbeeld geeft. De richtinggevoelige microfoonstand (het 'naar voren kijken') wordt dus veel selectiever ingezet. Bij een consumentenonderzoek gaf 75% de voorkeur aan Motion Sensor Hearing boven een traditionele microfoonstrategie (Toronto studie 2019). En het mooie is dat de gebruiker er geen omkijken naar heeft omdat het volledig automatisch werkt.



myPhonak App

Digitale oplossingen op maat

Het is niet zomaar een app: het is de slimme manier om uw Phonak Paradise hoortoestellen te bedienen, toegang te krijgen tot handige functies en uw instellingen te personaliseren. Download de [myPhonak app](#) (Google Play of App Store) en haal het meeste uit uw hoortoestellen. Hier is een glimp van wat mogelijk is ...

Afstandsbediening biedt u de mogelijkheid uw hoortoestellen in realtime te bedienen. Stel u het gemak voor van het kunnen aanpassen van het niveau van de dynamische ruisonderdrukking om makkelijker een gesprek met een vriend in een luidruchtig restaurant te voeren. U kunt Tap Control ook naar uw voorkeur configureren.

Remote Support stelt uw audicien in staat uw hoortoestellen op afstand (via het internet) bij te stellen in real time. Dit is handig in situaties wanneer u geen tijd heeft voor een bezoek aan de winkel of als u gewoon wilt dat uw audicien uw hoortoestellen optimaliseert in echte situaties en niet alleen in de winkel.

De beste connectiviteit met Phonak Paradise


Verbind met miljarden apparaten

Phonak Paradise is het summum van hoortechiek door de uitstekende geluidsprestaties, groot gebruiksgemak en unieke samenwerking met smartphone, tablet en TV.

- **Verbind direct met miljarden apparaten** (iOS & Android etc) dankzij de universele bluetooth connectiviteit voor mobiel bellen (Made For All), nog altijd uniek in de branche.
- Ook uniek is dat nu **twee Bluetooth-apparaten tegelijkertijd verbonden** kunnen zijn. Zoals een smartphone en tablet, of twee mobiele telefoons, of een mobiele telefoon en de navigatie in de auto etc. u wisselt snel tussen deze apparaten zonder extra handelingen zoals u dat vroeger ook moeiteloos kon.
- **Bel handsfree via de hoortoestellen zelf:** accepteer het inkomende gesprek op het hoortoestel zelf en de hoortoestelmicrofoons vangen ook uw stem op.
- **Caller ID:** Hoor wie er belt door de gesproken aankondiging in de Paradise hoortoestellen zodat u een inkomend gesprek kan weigeren indien gewenst.
- **Geniet moeiteloos van de TV met de direct streaming naar beide oren met de TV-Connector.** Door de bedrijfseigen AirStream techniek is geen Bluetooth verbinding nodig zodat er meer apparaten kunnen samenwerken met Phonak Paradise.
- Door de universele connectiviteit heeft **iedere cliënt toegang tot remote support.** Bijstellen op afstand is zeer eenvoudig via de myPhonak app.
- En last but not least, met **RogerDirect hoeft u niet langer een schoentje of halslus te gebruiken** om de Roger microfoon draadloos met het hoortoestel te verbinden.





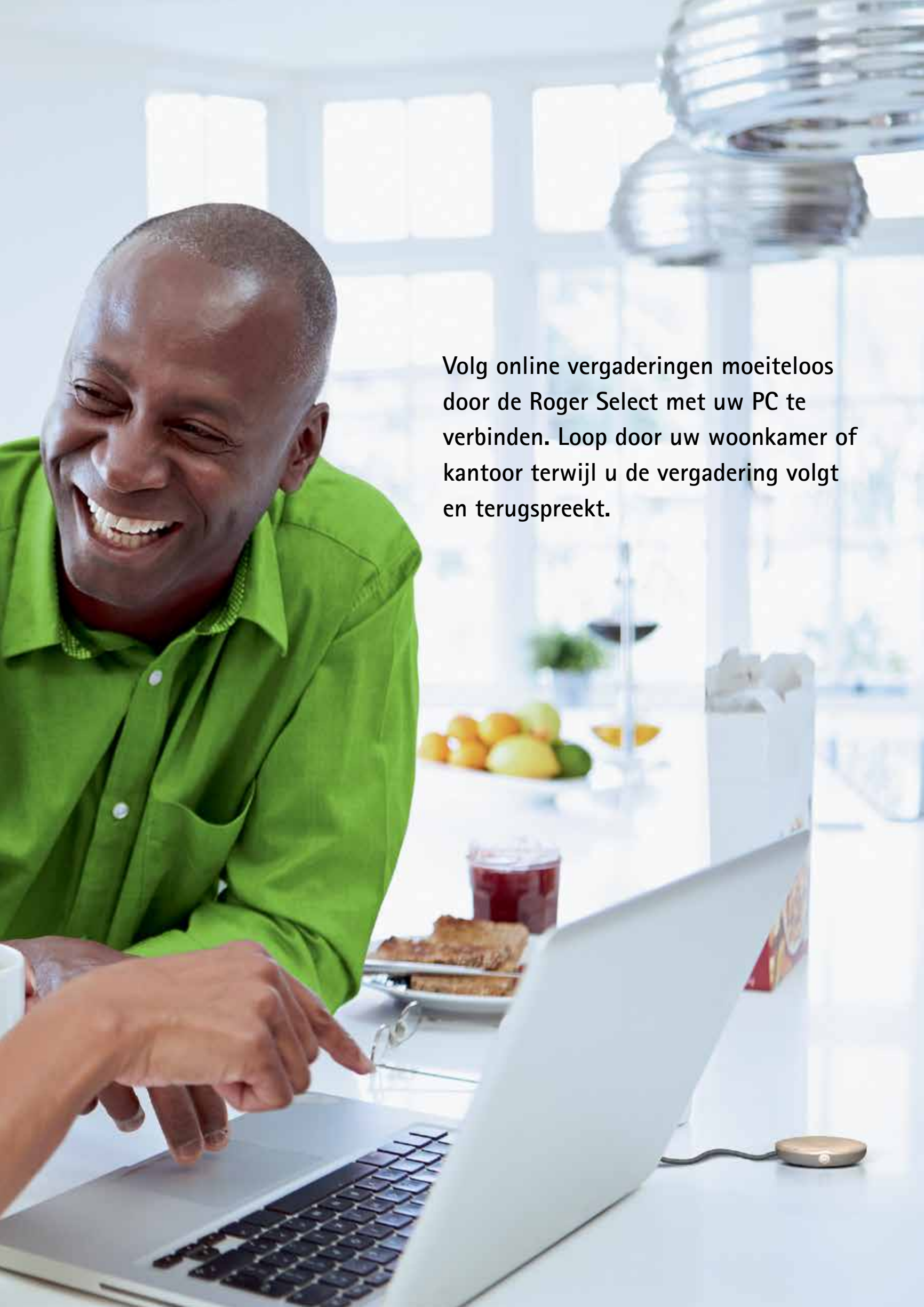

Volg online vergaderingen moeiteloos door de Roger Select met uw PC te verbinden. Loop door uw woonkamer of kantoor terwijl u de vergadering volgt en terugspreekt.

Wij willen het
leven van de
slechthorende
veranderen
zodat deze weer
kan zeggen:
Life is on

Hoor beter voorbij de 1.5 meter!

Maak kennis met de Roger richtmicrofoons voor het beste spraakverstaan, de oplossing bij afstand houden, mondkapjes en spatschermen.

roger



De Roger Select microfoon

Afstand houden is erg belangrijk tijdens de pandemie. Helaas is afstand nou net één van de factoren die het verstaan van spraak flink bemoeilijkt voor hoortoestel dragers. Omgevingslawaaï is de tweede en tevens meest bekende factor, u zult dit vast herkennen. En daar komen nu mondkapjes bij. Hoortoestellen worden steeds beter, maar werken alleen optimaal in een straal van 1 tot 1.5 meter rondom de slechthorende, de zogenaamde 'Soundbubble'. Staat (of zit) een spreker verder dan die 1.5 meter, dan is spraak snel te zacht. Zeker als er ook nog sprake is van bijkomend

omgevingslawaaï en overbruggen van afstand. Merkt u ook dat het 'afstand houden' het lastiger maakt een gesprek te voeren? Dan is de Roger Select de moeite waard eens te proberen. Deze losse richtmicrofoon kan draadloos verbonden worden met uw hoortoestellen en is een kampioen in het wegfilteren van omgevingslawaaï. U legt de microfoon voor u op tafel of u hangt deze bij uw partner/kennis om de hals als deze een mondkapje draagt. Het kan een uitkomst zijn bij een verjaardag, restaurantbezoek, op de fiets of in de auto. Ook voor de werkende slechthorende biedt Roger veel steun tijdens (online) vergaderingen, zodat u aan het eind van de dag nog energie over heeft voor de leuke dingen in het leven die u juist kwaliteit van leven geven. Uw audicien vertelt u graag over de uitstekende vergoedingsmogelijkheden van solo-apparatuur bij uw zorgverzekeraar.



**HEAR
THE WORLD
FOUNDATION**

a Sonova Group initiative

BETTER HEARING FOR A BETTER FUTURE

Hear the World is een wereldwijd initiatief van hoortoestellenfabrikant Phonak en heeft als doel meer mensen bewust te maken van het belang van een goed gehoor. Dit initiatief vraagt aandacht voor de sociale en emotionele aspecten als gevolg van een slecht gehoor. Meer dan 16% van de wereldbevolking krijgt te maken met gehoorverlies. Phonak heeft de Hear the World Foundation opgezet om mensen in kansarme landen het genot van een goed gehoor te kunnen bieden.

Diverse internationale artiesten zijn ambassadeur voor de foundation. Er bestaan prachtige foto's van internationale artiesten in de karakteristieke 'Hear the World pose'. In 2020 heeft de Hear the World Foundation weer veel projecten ondersteund. Ze is actief in vele landen, o.a. India, Vietnam, Haïti, Panama en Armenië om ook daar goede hoorzorg een kans te geven. Op www.hear-the-world.com vindt u meer informatie over de afzonderlijke projecten.

Hear the World is een wereldwijd initiatief van hoortoestellenfabrikant Phonak en heeft als doel meer mensen bewust te maken van het belang van een goed gehoor. Dit initiatief vraagt aandacht voor de sociale en emotionele aspecten als gevolg van een slecht gehoor. Meer dan 16% van de wereldbevolking krijgt te maken

met gehoorverlies. Phonak heeft de Hear the World Foundation opgezet om mensen in kansarme landen het genot van een goed gehoor te kunnen bieden.

Diverse internationale artiesten zijn ambassadeur voor de foundation. Er bestaan prachtige foto's van




internationale artiesten in de karakteristieke 'Hear the World pose'. De Hear the World Foundation ondersteunt veel projecten in diverse landen, o.a. India, Vietnam, Haïti, Panama en Armenië om ook daar goede hoorzorg een kans te geven.

Op www.hear-the-world.com vindt u meer informatie over de afzonderlijke projecten.



Marvin Hoogerwerf (Phonak NL) leverde een bijdrage aan Hear the World op een school in Moldavië met 100 slechthorende kinderen. Deze school wordt al enkele jaren door Sonova ondersteund met nieuwe hoortoestellen en/of Roger systemen.

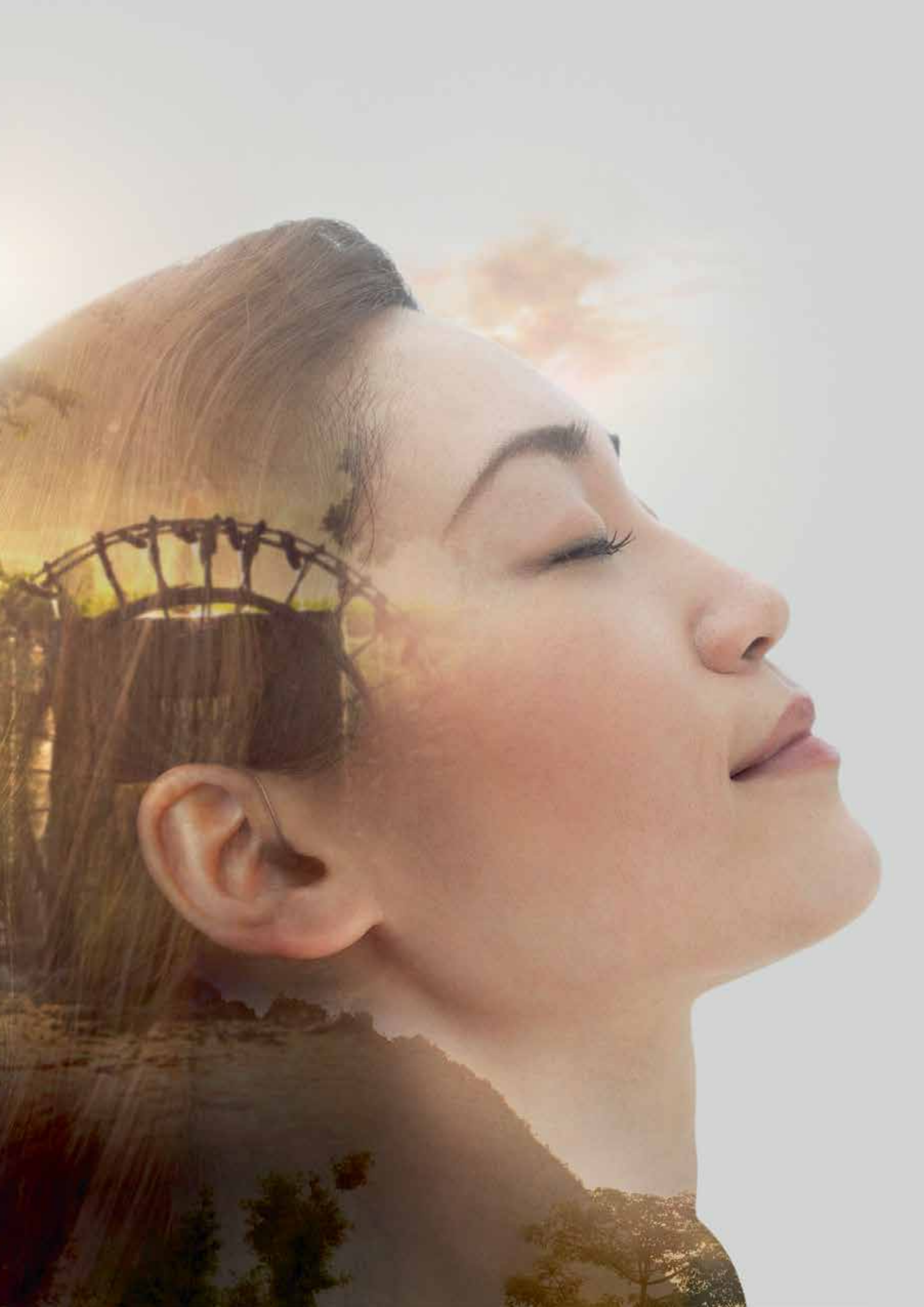

Zet de eerste stap naar verbetering van uw gehele welzijn met Phonak Paradise



Als u goed hoort, bent u goed uitgerust om het leven dat u wilt te omarmen. Uit groeiend bewijs blijkt dat goed horen een positieve invloed kan hebben op uw sociaal-emotionele, mentale en fysieke welzijn.¹



Sociaal-emotioneel welzijn

Door goed te horen kunnen we sociaal actief zijn, contact maken met anderen en effectief communiceren - zonder belemmeringen.



Mentaal welzijn

De hersenen spelen een cruciale rol bij het luisteren en verstaan van spraak - het is belangrijk om ze te blijven stimuleren. Dat is waar hoortoestellen een rol spelen.



Fysiek welzijn

Goed horen geeft u een groter bewustzijn van de omgeving en bevordert gevoelens van veiligheid en vertrouwen. Dit bevordert een actief leven.

Goed horen is je goed voelen

¹ Vercammen, C., Ferguson, M., Kramer, S.E., Meis, M., Singh, G., Timmer, B., Gagné, J.-P., Goy, H., Hickson, L., Holube, I., Launer, S., Lemke, U., Naylor, G., Picou, E., Scherpiet, S., Weinstein, B., & Pelosi, A. (2020). Well-Hearing is Well-Being: A Phonak Position Statement. *Hearing Review*, 27, 18-22.

Geniet van alledaagse dingen zonder beperkingen.
Er is geen betere manier om geluid te herontdekken dan met
een door de natuur zelf geïnspireerd hoortoestel.

Niets klinkt als het geluid van Paradise





Phonak heeft kantoren in meer dan 30 landen. In Nederland is de organisatie gevestigd in Vianen (Utrecht). Vanuit daar ondersteunt ze de Nederlandse professionals, zoals audiciens en audiologische centra, in hun dagelijkse werkzaamheden om de slechthorende de best mogelijke oplossing te bieden. Samen met de zustermerken Advanced Bionics en Unitron bedienen ze een brede groep cliënten variërend van lichte tot zeer zware gehoorverliezen.



Phonak is onderdeel van Sonova AG



Phonak is volledig
toegewijd aan haar
missie om
slechthorenden
te helpen hun
dagelijks leven
zonder
beperkingen
te leven.

PHONAK

life is on

Bij Phonak geloven we dat goed horen gelijk staat aan je goed voelen en van het allerhoogste belang is om alles uit het leven te halen. Al meer dan 70 jaar creëren we met veel passie een wereld waarin 'life is on' voor iedereen geldt. Onze innovatieve hooroplossingen zijn er voor mensen van alle leeftijden en alle gradaties gehoorverliezen om hen sociaal te verbinden en mentaal en emotioneel te laten groeien.

www.phonak.nl

Is het lied van de Japanse wit-oog vogel
één van de wonderen van geluid?



Phonak Audéo™ Paradise

Niets klinkt als het geluid van Paradise

Maak kennis met Phonak Paradise voor een ongeëvenaarde hooroplossing.

Helder natuurlijk geluid – briljant spraakverstaan – gepersonaliseerde
ruisonderdrukking – oplaadbaar – directe verbinding alle merken
smartphones, TV en meer



Phonak Audéo™ Paradise