

Oploadmogelijkheden voor ReSound hoortoestellen

ReSound biedt oplaadbare oplossingen met inductief opladen en een batterij die de hele dag meegaat, zodat uw klanten onderweg kunnen blijven.



	Premium charger	Standaard charger	Desktop charger	Custom charger
microRIE 60S ¹ 	8	8	8	-
miniRIE 60 ReSound Savi 	9	9	9	-
miniRIE 60 ReSound OMNIA 	6	6	6	-
BTE 77 ² 	-	-	70	-
PBTE 88 ³ 	-	-	80	-
SPBTE 98 ReSound Enzo IA 	-	-	90	-
ITE/ITC ⁴ 	-	-	-	C

¹ **microRIE 60S:** ReSound Viviva & ReSound Nexia

² **BTE 77:** ReSound Nexia & ReSound OMNIA

³ **PBTE 88:** ReSound Nexia & ReSound OMNIA

⁴ **ITE/ITC:** ReSound Nexia & ReSound OMNIA

Hoe kunt u ReSound hoortoestellen koppelen aan de juiste oplader?

Elk type oplader wordt aangeboden met verschillende inzetstukken - bekend als de oplaadvormfactor (CFF) - die betrekking hebben op het specifieke ReSound hoortoestelmodel.

De CFF wordt aangegeven met een nummer en is te zien binnenin de oplader en op de verpakking van de oplader.



CFF-nummers worden nog niet op alle opladerverpakkingen weergegeven, raadpleeg het nummer binnenin de oplader:

- ReSound OMNIA RIE heeft CFF 1 dat binnenin de oplader wordt weergegeven
- ReSound Quattro RIE en ReSound Key RIE hebben CFF 3 dat binnenin de oplader wordt weergegeven



Kenmerken van de oplader

	ReSound Vivia™, ReSound Nexia™ & ReSound OMNIA™				ReSound Savi™, ReSound LiNX Quattro™ & ReSound Key™		ReSound Enzo™ IA
	Premium charger	Standaard charger	Desktop charger	Custom charger	Premium charger	Desktop charger	Desktop charger
	microRIE/ miniRIE/RIE	microRIE/ miniRIE/RIE	microRIE/ miniRIE/RIE/ BTE/Power BTE	ITE/ITC	miniRIE/RIE	miniRIE/RIE	Super Power BTE
Inductief opladen	•	•	•	•	•	•	•
Draagbaar met ingebouwde powerbank	•				•		
Draagbaar zonder powerbank		•		•			
USB-C aansluiting en kabel	•	•	•	•	•	•	•
LED aan de achterkant	Toont de batterijstatus van de powerbank	Licht op wanneer de oplader is aangesloten op een stroomvoorziening	Toont wanneer de lader is aangesloten op een stroomvoorziening	Toont wanneer de lader is aangesloten op een stroomvoorziening	Toont de batterijstatus van de powerbank	Toont wanneer de lader is aangesloten op een stroomvoorziening	Toont wanneer de lader is aangesloten op een stroomvoorziening
LED aan de voorkant	Toont het opladen van de hoortoestellen			Toont het opladen van de hoortoestellen	Toont het opladen van de hoortoestellen		

Hoe te zien of de hoortoestellen aan het opladen zijn.

Plaats de hoortoestellen in de oplader en laat de lichtindicator op de hoortoestellen u begeleiden. Het is hetzelfde proces, ongeacht welke oplader wordt gebruikt

U weet dat het opladen is gestart wanneer de lampjes van het hoortoestel langzaam knipperen.

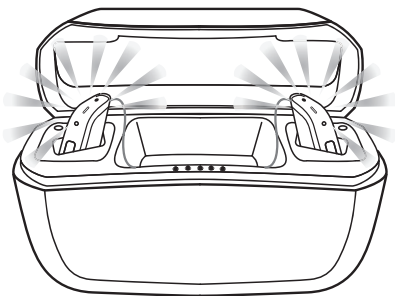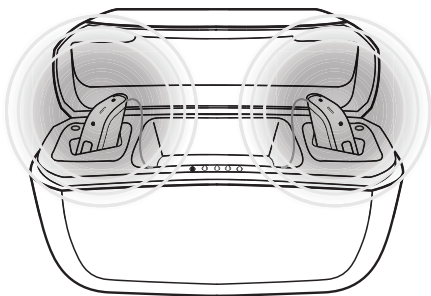

Als de hoortoestellen volledig opgeladen zijn, blijven de lampjes constant en knipperen ze niet.

De lampjes gaan uit wanneer de hoortoestellen uit de oplader worden gehaald.

Premium charger geïllustreerd.
Voor meer informatie, zie de individuele gebruikershandleiding voor elke oplader

Worldwide Headquarters
GN Hearing A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
Denmark
Tel.: +45 4575 1111
gnhearing.com

Nederland | België
GN ReSound Benelux B.V.
Florijnweg 25
6883 JN Velp
Nederland
Tel.: +31263195000
gnhearing.com

CVR no. 55082715